
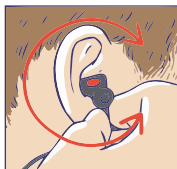
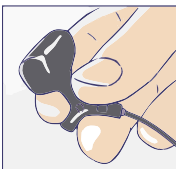
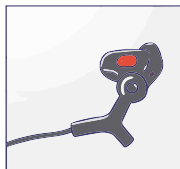


## Mise en place de vos protections auditives


1. Placez le cordon sur vos protections (suivant la notice jointe)
2. Repérez les codes : rouge (droit) et bleu (gauche)
3. Prenez la protection par sa poignée entre le pouce et l'index avec la main correspondant à votre côté d'oreille

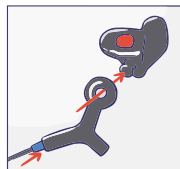

**Passtop A**

Tenez la poignée par le bas et introduisez doucement la protection dans votre conduit en tournant légèrement d'avant en arrière.

## Passtop N, Passtop T, Passtop EP2



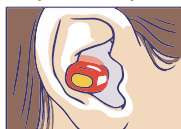


Tenez la poignée entre le pouce sur la partie marquage et l'index. Introduisez la partie la plus fine du bouchon dans votre conduit et tournez vers l'avant pour placer le crochet sous le pli de la peau (hélix).

## Passtop O.S, Passtop O.R, Passtop C



## Pianissimo

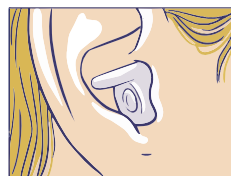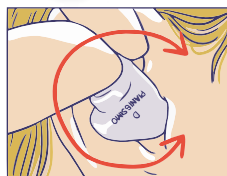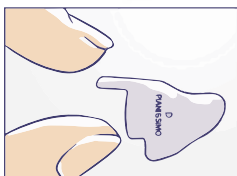

Tenez la poignée vers le haut entre le pouce et l'index. Introduisez la protection dans votre conduit doucement par un léger basculement.